



KURZANLEITUNG DEFIBRILLATOR



Im Notfall (keine Atmung) folgende Schritte durchführen:

1. Notruf absetzen → 112
2. Scheibe des grau-weißen Kastens einschlagen und roten Hebel nach unten drücken
3. Rote Schutzhülle entnehmen, öffnen und blauen Defibrillator entnehmen
4. Transparente Schutzabdeckung abziehen (bei uns mit „Pull“ gekennzeichnet) → Ab diesem Moment führt der Defibrillator sprachlich Schritt für Schritt durch die Anwendung
5. Weiße Schutzfolie abziehen und die zwei Klebepads entnehmen
6. Mit der beiliegenden Schere Kleidung vollständig aufschneiden (T-Shirt, BH, Pulli etc.) und die Brust freimachen → bei starker Brustbehaarung mit dem beiliegenden Einmalrasierer die Brust von Brusthaaren befreien
7. Klebepads wie abgebildet aufkleben
8. Das Gerät führt nun eine 15-sekündige Herzanalyse durch und entscheidet selbstständig, ob eine manuelle Reanimation durch euch gestartet/fortgesetzt wird oder das Gerät einen Stromstoß abgibt
9. Falls das Gerät die Notwendigkeit für einen Stromstoß erkennt, leuchtet die orangefarbene Warnlampe mit dem Blitz. Wichtig: Nur die Person, die den Verunfallten reanimiert, drückt diese Taste NACHDEM sichergestellt ist, dass niemand Körperkontakt mit dem Verunfallten hat (Abstand min. 0,5m)
10. Anschließend führt das Gerät eine erneute Herzanalyse durch und entscheidet zwischen manueller Reanimation durch euch oder Stromstoß durch den Defibrillator → dies wird alle 2:45min. durch das Gerät wiederholt
11. Ablauf bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes fortsetzen